

Scheda Tecnica

Codice: **FFP2GR1P**



Descrizione:

Mascherina Protettiva **FFP2 NR/GR200**
 Categoria DPI: III
 Tridimensionale con filtro per autorespirazione
 Semimaschera filtrante per la protezione da COVID-19
 Capacità filtrante $\geq 95\%$
 Colore: Bianco

Certificazione:

Conforme alla normativa: CE0598/ EN 149:2001+A1:2009

Confezionamento:

20 BOX DA 50 PEZZI (SUDDIVISI IN BLISTER DA 1 PEZZO)
 BARCODE SU BLISTER DA 1 PZ

PESO NETTO/CT = 10,00 KG
 PESO LORDO/CT = 11,00 KG

PALLET DA: 3 CARTONI PER 4 STRATI (12 CT IN TOTALE)
 MISURE PLT= 80X120X130

Descrizione:

La FFP2 ha un tessuto trapuntato e uno stringinaso adattabile per minimizzare l'uscita d'aria dalla parte superiore e evitare l'appannamento degli occhiali. Il lembo sul mento impedisce eventuali bypass dal basso e la rende facile da indossare, molto confortevole. I tre lembi assicurano stabilità sul viso, facile posizionamento di precisione e perfetta compatibilità con gli occhiali.

Stoccaggio:

Conservare il DPI in ambienti interni freschi, lontano da agenti atmosferici e getti di vapore. Conservare il DPI lontano da fonti di calore, fiamme libere e dal diretto irraggiamento del sole. Prima dell'utilizzo riporre la mascherina pulita all'interno di un contenitore, al riparo dalla luce solare diretta, da agenti atmosferici, fonti di calore, dalla polvere, liquidi ed umidità.

Temperature di conservazione e utilizzo: - 5°C + 50°C

Istruzioni per l'uso:

1. Stendi la maschera e verifica, se la parte frontale della maschera sia intatta
2. Posizionare la maschera contro il mento
3. Coprire la bocca e il naso, posizionare gli elastici auricolari su entrambe le orecchie per avere una sensazione confortevole
4. Premi contemporaneamente la clip per naso con l'indice e il dito medio di entrambe le mani sulla parte superiore del centro su entrambi i lati fino a quando non si avvicinano al ponte del naso.
5. Coprire la maschera con entrambe le mani e condurre test di aderenza al viso respirando e ispirando.

BIO EXTRUSION S.R.L. – P. I. & C.F.: IT03839450925 – Tel. 348.7326256 – Codice SDI: SUBM70N
Sede Legale: Via G. Mameli n.184 – 09123 Cagliari (CA) - Sede Operativa: Via Taglio Sinistro, 61/U – 30035
Mirano (VE) - Web: www.bioextrusion.it E-mail: info@bioextrusion.it – Pec: bioextrusion@legalmail.it